

～基礎講座～ 足や靴の相談時のポイント・コツ

『あゆみシューズ』の原点

「はける靴が欲しい。そして、風を感じたい。」

歩行に不安や困難を感じる方々のこんな切実な願いを叶えること。

これがあゆみの原点です。

あゆみは、誠意を尽くしてあなたの足を守ります。

「困ったときのあゆみ。」こう呼ばれることが私たちの誇りです。

日本 一の「ありがとう」の数。これが私たちの勲章です。

2026年6月 Ver1.0
徳武産業株式会社

足元から人生を幸せに

TOKUTAKE



～ 靴の接客に入る前に心の中で確認 ～

- ①「今、お客様が履いている靴サイズが一番大きいサイズ」
- ②「シニア向けの靴は“横幅(ワイズ)”がポイント」
- ③サイズの“候補”が重要（ワンサイズでは決まらない）
- ④“今履いている”サイズから試し履きして頂く

【候補が何故必要？】足サイズについて無自覚な方が多い

一度、ぜひ皆様足の計測をされてみてはいかがでしょうか？

	差なし	0.5cm	1cm	1.5cm	2cm	2.5cm	3cm	計
適正-自覚	6	21	33	22	12	8	0	102
適正-着用	3	14	27	30	14	9	5	102

(単位: 足)

引用) 長谷川正哉:高齢者が自覚する靴サイズ、着用するサイズ、足形に基づく適正サイズの相違、理学療法の臨床と研究,2015

特にシニアの方は足と靴のサイズ相違により
「転倒リスク」、「足のトラブルが増える」
可能性が高いです

(現場にいったら)靴の選定の前に“情報取り・観察”が重要

腫れ・むくみ



変形



短下肢装具



爪関連



屈めない

(下方アプローチ)



【くり返し：このようなお客様が多いから】

お客様の暮らし(生活)を聞かないと

商品選定ができない！

・身体、症状、生活を知る

(靴に必要な機能を確認)

画像抜粋:なぜなに装具⁴

Tokutake industry. All rights reserved. 無断複製・使用を禁じます。

シニア向けのフィッティングで重要な点

- ① お客様の暮らしを聞く
 - ・身体、**症状**、生活(靴に必要な機能を確認)
- ② サイズ候補決定(シニアは特に横幅)
 - ・計測、試履き候補決定(私たちと異なる)
- ③ 履いてみる(私たちはいきなりココから<サイズ決まってる>)
 - ・歩ける方は歩いてもらう
 - ・お客様に決めてもらう

介護用靴選定の重要行程


健常者の靴の選定

何故フィッティングが重要？ ～4つの背景・条件～

なぜケアシューズが必要なのか？


あゆみ

日本は「足のトラブル大国」

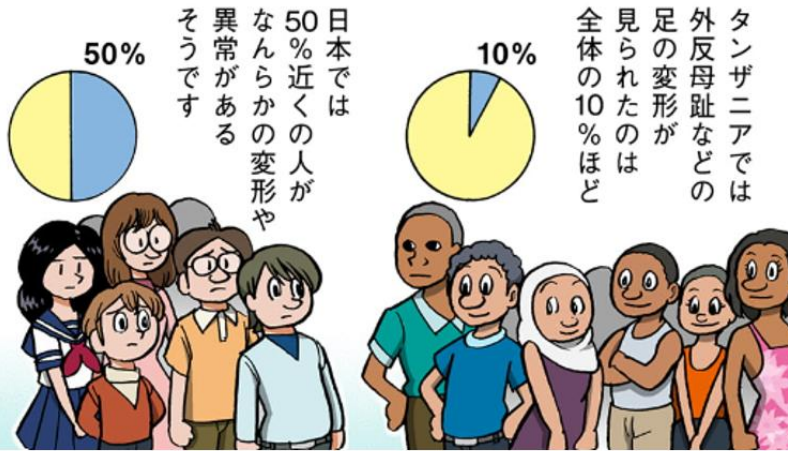

高齢者に多い姿勢・歩き方の特徴

- ・O脚
- ・猫背
- ・すり足

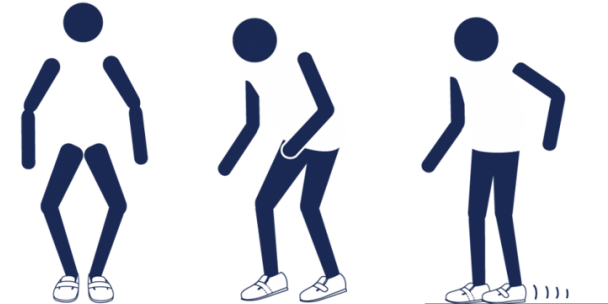

なぜその姿勢・歩き方になるのか？


答え:「足の健康状態が悪い」

足のトラブルを引き起こす原因の一つ


足のアーチ

加齢に伴いアーチはくずれやすくなります

3つのアーチは足が地面に着いた時にバネの役割として衝撃を吸収します

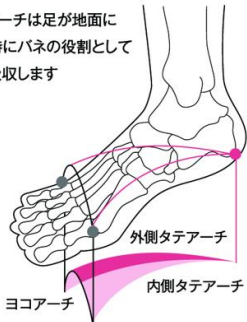

なぜ??? アーチが崩れるの？

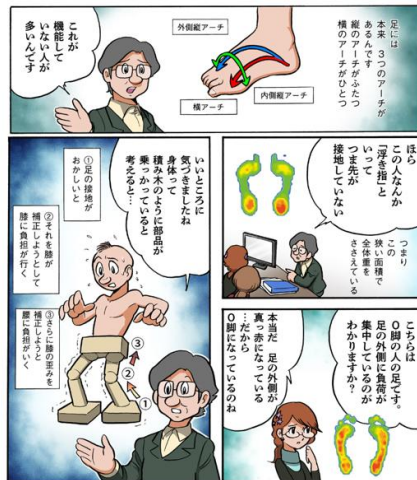

なぜ？アーチが崩れるの？

答: 足に靴が合っていない(サイズ、形など)

問: サイズの大きすぎる靴を履くと...

×: ゆったりして履きやすい

大きな靴の問題点

① 足が前にすべる




② かかとの動きに靴が付いてこない



● 靴擦れや捻挫が起きやすい

* こんなときにもチェック✓
体重が増減したときにも靴のサイズをチェック✓

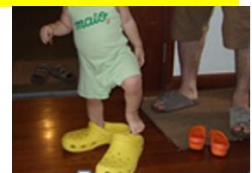


なぜケアシューズが必要なのか？（転倒リスクも）

あゆみ

条件(加齢・姿勢の変化・靴のサイズが大きい)がそろうと



- ・踵が浮いてしまう。
- ・前足部が余りすぎて、地面に引っ掛かりそうになる。
- ・脱げてしまう。

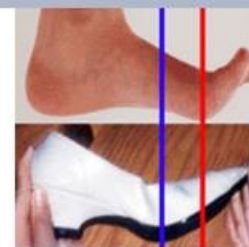

<参考>

- ・巻き爪
→化膿していない
- ・陥入爪
→化膿している
- ・白癬菌
- ・水虫菌
→24時間以内に手を洗う

合わない靴を履き続ける事で、様々な足のトラブルを引き起こすといわれています

たこ



靴などの圧迫により皮膚の表面、角質が厚くなった状態。芯はなく、皮膚が固く盛り上がり圧迫されると痛む。



魚の目



靴などの圧迫により皮膚の一部が固くなった状態。芯があり圧迫されると痛む。



外反母趾



つま先が狭く母趾が圧迫される靴を履き続けるために文字通り母趾が外側に曲がる病気。



靴ずれ



合わない靴を履く事で皮膚が靴でこすられて水ぶくれが出来る。



ハンマートウ



つま先に余裕がなく、ゆび先がつまった靴をゆびを曲げたまま履き続ける事によって関節が曲がって固定してしまう病気。



陥入爪



靴のつま先部分が薄すぎると爪を圧迫し、爪の両側が肉に食い込んで炎症を起こす。



～ 計測前に心の中で確認 ～

「今、お客様が履いている靴のサイズが一番大きいサイズ」
「シニア向けの靴は横幅がポイント」
サイズの候補が重要

 YouTube^{JP} でも計測方法、学習できます



使用ツール：あったら便利

①「あゆみ」専用計測器

正しい計測をして
お客様にあった商品提案をサポート

品番 9210

3,850円 (税抜3,500円)



②計測シート(顧客カルテ)

足のサイズの計測



計測したサイズ▼

	足長	足幅	足囲
右足	cm	cm	cm
左足	cm	cm	cm


決定したサイズ▼

	品番	品名	ウィズ	サイズ	カラー
右足			E		
左足			E		

覚えて頂きたい単語:「足長」「足囲」

あゆみ

たった3箇所測るだけ!(あゆみが重視するのは2箇所!)

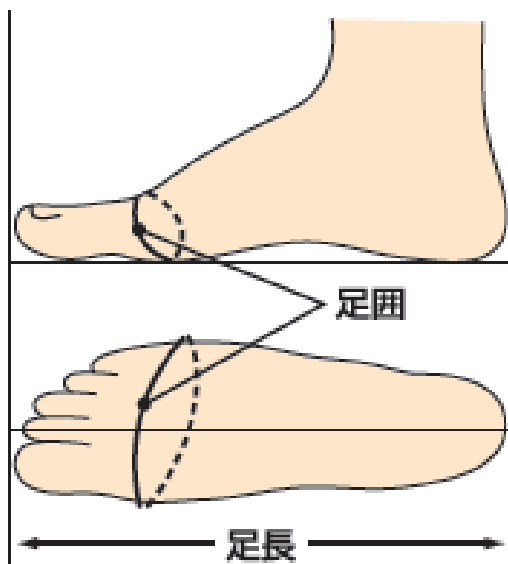

足囲 そくい

左記足幅を測った部分の
周りの寸法

足長 そくちょう

足長=かかとの後端から
一番長い足ゆびまでの長さ



足幅 そくふく

足幅の最も広い部分

親指のつけ根の骨のとび出ている部分から、小指のつけ根の骨が出ている部分の幅




①サイズを測定します。計測器使用

あゆみ


簡易計測器を活用すると便利！

足長

- ①かかとと足の内側を計測器にしっかりとくっつけます
- ②足ゆびが一番長い箇所までスライドさせて、足長を測ります

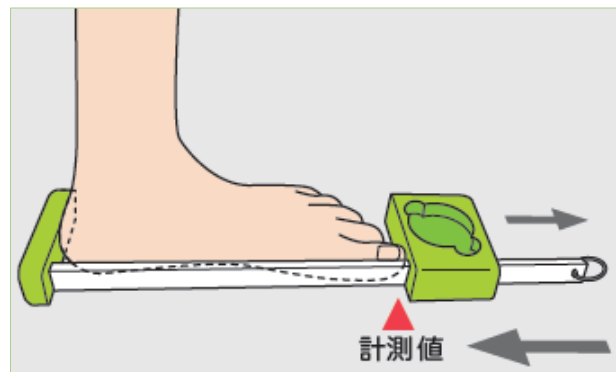


姿勢

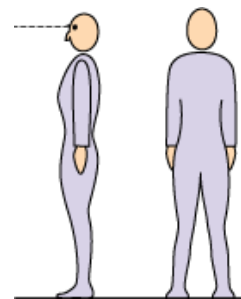

足幅

親ゆびと小ゆびをの骨の飛び出ている部分をまっすぐに計測します

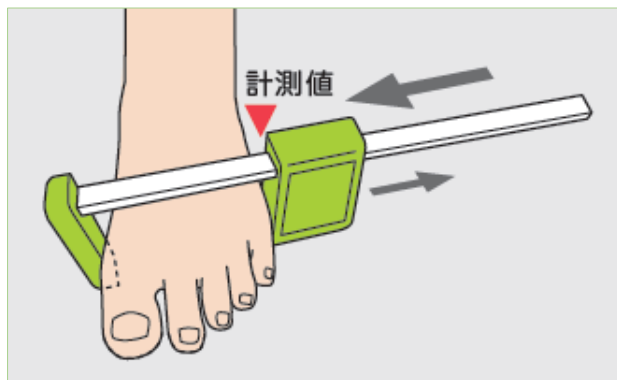

足囲

メジャーを使って測ります。
足幅を測ったところを同じ部分をぐるっと1周。



靴に足入れができるかどうかの重要なポイント。1番厚みがある部分とは異なりますので、要注意です！

測定のコツ：足囲計測時に役に立つこと


あゆみ

①まず指で位置を確認



「触っても大丈夫ですか？」と確認

②利き手でゼロ付近を握る

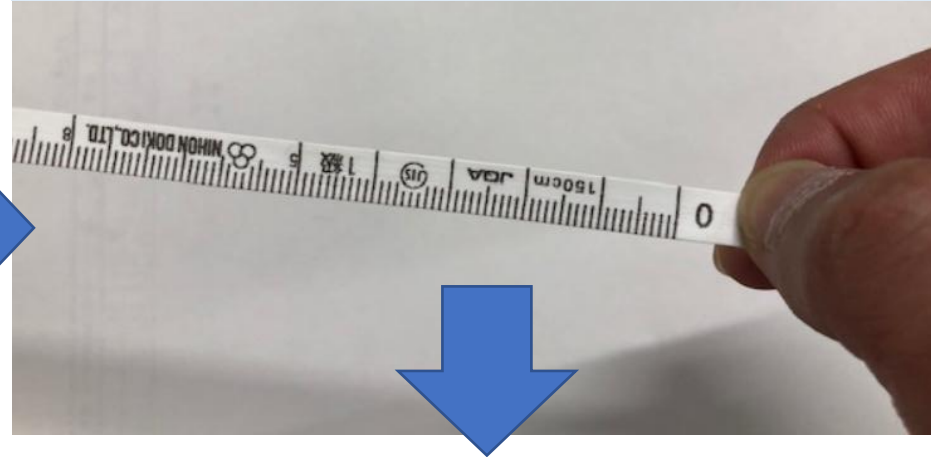

③足裏から巻いて目盛ゼロが甲上に



参考:足囲計測時に確認頂きたいこと

あゆみ

～メジャー巻いたまま、座ったり・立ったりして下さい～



ほとんどの方は座位より立位の方が数字が大きくなります


参考:足囲計測時の注意点

(親指側と小指側で引っ張っている部分を確認)

あゆみ

左足

右足

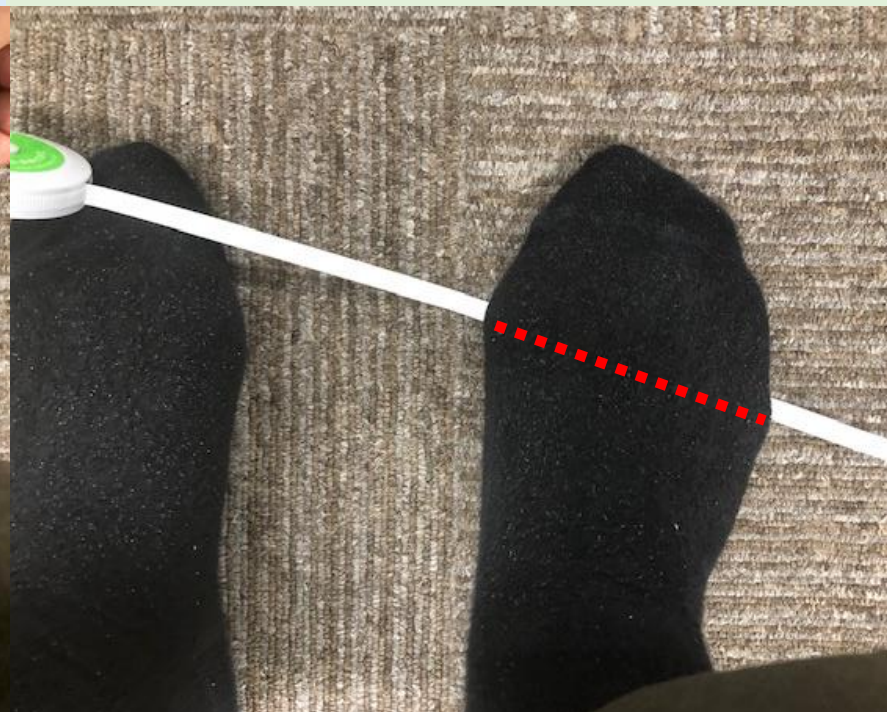


オススメはメジャーを足裏から先に回すと測りやすいです

注意点：良い計測姿勢




自然立位

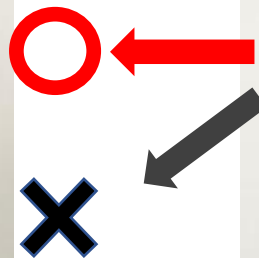

視線を水平に(下見ない)



体重を左右均等

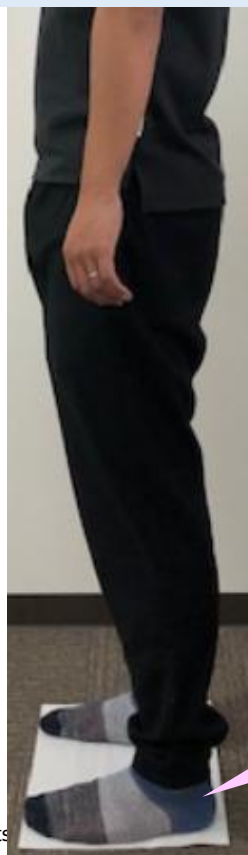

つま先も水平に

動画:立位(加重位)と座位(非加重位)は足が変化する



足長

足囲



②靴のサイズの候補を絞る

お客様に確認すべきポイント：

①靴下の厚みを気にする ※季節の変わり目に靴下の厚みが変わる

例：「いつ頃履く靴をお探しですか？」・・・冬の時期は靴下が厚く、春先は薄くなる



②今の足より「むくみますか？」 ※午前中より夕方の方がむくむ方が多い。

・お薬の服用(例：利尿剤etc)

・朝晩のむくみの差(女性に多い) ※「のびのび靴下」で疑似的に体験

③自分で靴を履ける etc

サイズ (座位/立位) ※靴下を履いて測定	足長	右	25.7 cm	足囲	右	26 cm
		左	cm		左	cm
サイズ (座位/立位) ※靴下を履いて測定	足長	右	26.2 cm	足囲	右	27 cm
		左	cm		左	cm

高齢者施設で顧客カルテを作って差し上げると 消費者様・専門職とつながりが生まれます。

あゆみ

他社事例：

お客さま情報シート

日付

お名前						
通院(病院)						
ご住所(お住まい) ※在宅/施設	〒					
TEL						
TEL(ご家族)						
(普段)靴のサイズ	cm					
サイズ(座位) ※靴下を履いて測定	足長	右	cm	足囲	右	cm
		左	cm		左	cm
サイズ(立位) ※靴下を履いて測定	足長	右	cm	足囲	右	cm
		左	cm		左	cm

顧客訪問 カルテ

整理番号				
氏 名	様			
住 所	〒			
電話番号	()			

運 絡 日	令和 7 年 月 日			
訪 問 日	令和 7 年 月 日 曜日 時			
現在の靴サイズ				
足 長	右	cm	左	cm
足 幅	右	cm	左	cm
足 囲	右	cm	左	cm
装 具	右	有 無	左	有 無
備 考	外反母趾・内反小趾・幅広・甲高・浮腫・脚長差・爪・変形 尖足・足底板・白癬・麻痺・X脚・O脚・魚の目・タコ			

ご購入品

メーカー				
品 名				
サ イ ズ	右		左	
カ ラ ー				
納 品 日	令和 7 年 月 日			

ポイント：右斜め上のサイズを意識

あゆみ

CHECK

施設 外出 屋内リハビリ

▼「あゆみ」の基準は3Eです

単位：cm

サイズ (足長)	E 足囲(足幅) -1.2 (-0.4)	3E 足囲(足幅) ◀3Eとの差▶	5E 足囲(足幅) +1.2 (+0.4)	7E 足囲(足幅) +2.4 (+0.8)	9E 足囲(足幅) +3.6 (+1.2)	11E 足囲(足幅) +4.8 (+1.6)	17E 足囲(足幅) +8.4 (+2.8)
4S (18.0~18.5)		20.3 (7.3)	21.5 (7.7)				
3S (19.0~19.5)		21.0 (7.5)	22.2 (7.9)				
SS (20.0~20.5)		21.7 (7.7)	22.9 (8.1)				
S (21.0~21.5)	21.2 (7.5)	22.4 (7.9)	23.6 (8.3)	24.8 (8.7)	26.0 (9.1)	27.2 (9.5)	30.8 (10.7)
M (22.0~22.5)	21.9 (7.8)	23.1 (8.2)	24.3 (8.6)	25.5 (9.0)	26.7 (9.3)	27.9 (9.7)	31.5 (11.0)
L (23.0~23.5)	22.6 (8.1)	23.8 (8.5)	25.0 (8.9)	26.2 (9.3)	27.4 (9.7)	28.6 (10.1)	32.2 (11.3)
LL (24.0~24.5)	23.3 (8.4)	24.5 (8.8)	25.7 (9.2)	26.9 (9.6)	28.1 (10.0)	29.3 (10.4)	32.9 (11.6)
3L (25.0~25.5)	24.0 (8.7)	25.2 (9.1)	26.4 (9.5)	27.6 (9.9)	28.8 (10.3)	30.0 (10.7)	33.6 (11.9)
4L (26.0~26.5)	24.7 (9.0)	25.9 (9.4)	27.1 (9.8)	28.3 (10.2)	29.5 (10.6)	30.7 (11.0)	34.3 (12.2)
5L (27.0~27.5)	25.4 (9.3)	26.6 (9.7)	27.8 (10.1)	29.0 (10.5)	30.2 (10.9)	31.4 (11.3)	35.0 (12.5)
6L (28.0~28.5)		27.3 (10.0)	28.5 (10.4)	29.7 (10.8)	30.9 (11.2)	32.1 (11.6)	35.7 (12.8)
7L (29.0~29.5)		28.0 (10.3)	29.2 (10.7)	30.4 (11.1)	31.6 (11.5)	32.8 (11.9)	36.4 (13.1)
8L (30.0~30.5)		28.7 (10.6)	29.9 (11.0)	31.1 (11.4)	32.3 (11.8)	33.5 (12.2)	37.1 (13.4)

①足長

【候補の出し方】

①まずお客様が今履いているサイズの靴を試す

②足囲の横幅の候補を出せると解決しやすいことが多い

※順番がポイント

②足囲

ケアシューズは「足幅」ではなく「足囲」を何故計測？

表1 同一女性の浮腫の有・無における足寸法の比較例 単位mm

測定項目	浮腫なし（84才）		浮腫あり（92才）	
	右	左	右	左
足長	219	226	215 (98%)	218 (96%)
足幅	99	96	90 (91%)	92 (96%)
足囲	229	223	250 (109%)	262 (117%)
踵幅	61	61	63 (103%)	66 (108%)
第一指高	18	20	41 (228%)	41 (205%)
足高	56	27	67 (120%)	74 (130%)
外踝端高	49	45	41 (84%)	43 (96%)

(%) 内は浮腫なし時と比較した増減 すべて靴下装着による計測



図7 女性高齢者の浮腫の足

福祉介護テクノプラス19年1月号 特集高齢者のための靴選び “歩かない人の靴”を考えるより抜粋

特に後期高齢者の方の**足幅**は「浮腫あり・無し」では大差ない
足囲の場合は浮腫あり・無しでは差異あり
→**足囲**を重要視するが多い

急な依頼が来た！ ～計測器・デモ機が無い場合～

※計測器が無くても大まかに
測ることができます

- ① 中敷きが取り外せる靴をご用意
- ② 靴から中敷き取り出し、
中敷きの上に下記のように足を置いてください

踵をぴったりつける



次に確認：つま先の空間はどれくらい余っていますか？

答え合わせ：靴のつま先の空間は“指何本分”余ってますか？

あゆみ

理想：“捨て寸”10mm～15mm（**小指一本分程度**）

狭すぎる×



適切○



広すぎる×



ワイズ不足

横からの視点



踵をぴったりつける




先程履かれた靴の中敷きを計測

※実際には内側から履くのでミリ単位でもう少し狭い



何cmと書いてますか？

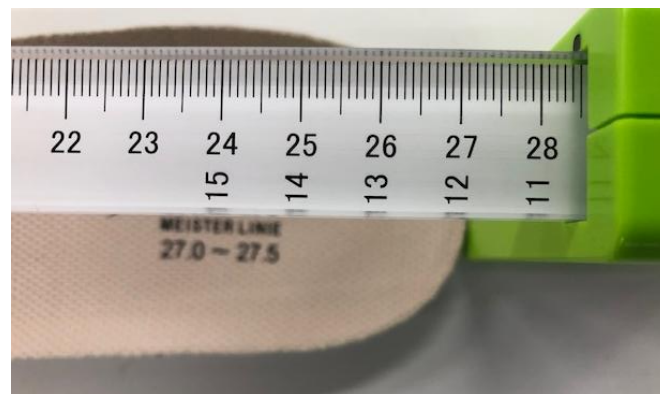

③靴の履き方・履かせ方

実際に履く～正しく靴を履き方～

あゆみ


かかととトントン、靴紐（ベルト）でしっかり固定！

1



①靴のベルトを開き、靴下のシワを伸ばして足を入れましょう

2

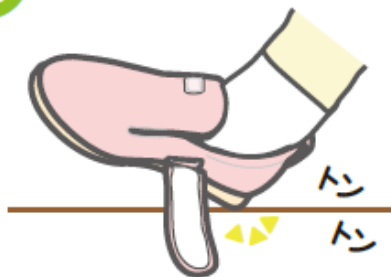

②つま先を少し上げ、かかとをトントンとして、靴のかかとと足のかかとをぴったりと合わせます

3



③かかとをぴったり合わせたらベルトをしっかり和めましょう

4



④足指を動かせるかどうか確かめましょう

あゆみシューズの鉄板商品 ～介護用の靴といえば～

現場で重宝するのは2点！

あゆみ

ダブルマジックⅢ シリーズ



【強いむくみ】+【外反母趾】

足に症状がある方は
特におススメ

瞬感スポッと



手が使えない+屈めない
完全ハンズフリーシューズ
※特に“脱ぎやすい”工夫

【介護用靴の条件：現場で調整しやすい機能】

ダブルマジックⅢシリーズ全**17**柄～

ダブルマジックⅢ あや かぜ 綾風



3Eのみ
通気性抜群

ダブルマジックⅢ



3E/5E/7E/9E/11E
業界唯一：超幅広対応

ダブルマジックⅢ ニット



ダブルマジックⅢ りん 凜 凜



ダブルマジックⅢ ストレッチ




3E/5E/7E

ダブルマジックⅢの特徴

01


ベルト
調整機能

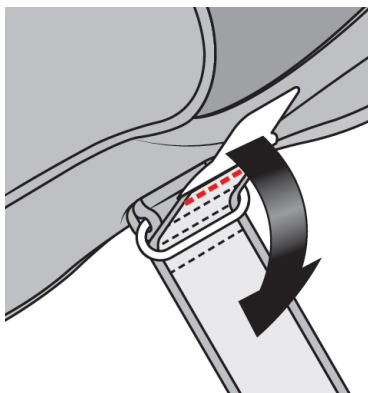

- 2センチ長くできる
- 現場で調整しやすい

02

足に優しい
中敷き

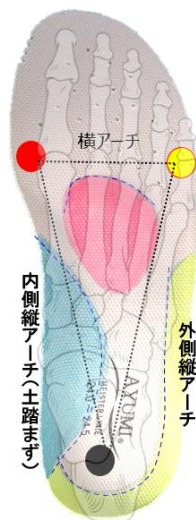

- 3つのアーチ構造を再現して足を支える
- 中敷きを取り外して使用もOK

03

幅広対応
(片足)

標準幅	品番 1097 足囲 3E
	品番 7035 足囲 5E
	品番 7036 足囲 7E
	品番 7037 足囲 9E
	品番 7038 足囲 11E

幅広タイプ(ワイド)

● 靴業界で
唯一靴の幅

04

パーツオーダー
(半カスタム)



- 身体状況に合わせて
半カスタムの加工サービス

“完全”ハンズフリーシューズです！

あゆみの
あゆみ

瞬感スポンと

施設・外出兼用

スリッポンタイプ



スッと履ける！サッと脱げる！

サッ



手を使わずに履きやすい靴

しゅんかん 瞬感 スポンと



1 履きやすい

ハードカウンター
内蔵！

2 脱げにくい

3 脱ぎやすい

ショート動画
公開中！



TOKUTAKE

好評な理由：手を使わず・脱ぎ履き可能



足関節が硬い→かかと踏み潰す

※ かかとを踏み潰すと転倒リスク増大



屈めない→様々な症状の患者様

※ 関節疾患(特に股関節)・運動器疾患・廃用性など

屈みにくい・屈めない(手が使えない)方へ

NEW 刺繍バージョンが新たに登場!!

施設用
外出用

しゅん かん
瞬感スポット

玄関に手すりを付けているお客様には
瞬感スポットがおすすめ!

狭い玄関で手すりにつかまりながらでも、
『脱ぎやすく』『履きやすい』
瞬感スポットを
ぜひお試しください。



手すりがある玄関で
もっと安心・快適に

- つかまりながら安全に着脱
- かがまず、ラクに履ける
- 足元が安定して安心

手を使わずに
スポットで履ける!

脱ぎやすい

履きやすい

瞬感スポット

一般的なハンズフリーシューズに比べて、
瞬感スポットとは**3つの特徴**があります!

- ① 甲のペロが厚みがあって
足入れしやすい



- ② 脱ぐとき簡単
(内側に脱ぎやすい引っ掛け)



- ③ かかと(靴ペラ)の形状が
“より足入れしやすい角度”



商品に関する問合せ

株式会社
〒100-0001 東京都千代田区千代田
電話 03-XXXX-XXXX



スタッフが
丁寧にサポート
いたします!

3E・5E対応

NEW



刺繍ブラック

NEW



刺繍シルバー

NEW



刺繍ゴールド

S・M・L・LL・3L

3E・5E・7E対応



ワイン



ブラック



ネイビー

S・M・L・LL・3L・4L・5L

5/18 冷感タイプ発売

夏場の足入れしたときの
「蒸れた感じ」や「靴のもわつと感・・・」

から **解放！**

ぜひ**父**の日の
キャンペーン
に！！！！



「ブルー」「グレー」の2色展開
「3E」「5E」の2ワイズ展開
(S~5Lまで展開)



最近ご質問頂く：“どの”ハンズフリーシューズが良い？

おすすめ
01

靴のかかとの角度の違い

一般靴



瞬感スポット



- 靴のかかとの角度が瞬感スポットのなだらかなので、より足入れがしやすい

おすすめ
02

より“脱ぎ”やすい

一般靴



瞬感スポット



- かかとと内側に脱ぎやすいような突起あり

おすすめ
03



- 甲のベロが厚みがあり、へたれにくく、上に立ち上がっている
→ 足をねじ込ませるように折りたたまなくても足入れしやすい

本日のまとめ



～ 靴の接客に入る前に心の中で確認 ～

- ①「今、お客様が履いている靴サイズが一番大きいサイズ」
- ②「シニア向けの靴は“横幅(ワイズ)”がポイント」
- ③サイズの“候補”が重要（ワンサイズでは決まらない）
- ④“今履いている”サイズから試し履きして頂く

あると便利！ 試し履き(特価で提供)

【3E】【5E】【7E】【9E】の4種類、ご用意いたしました。

品番：9003 「あゆみ」の定番

商品名：ダブルマジックⅢ 3Eセット

【販売価格】オープン価格

【納入価格】1セット 卸様経由でお見積もり下さい

※通常価格(7足+ディスプレイケース):51,800円

品番：9003 ワイドサイズ

商品名：ダブルマジックⅢ 5Eセット

【販売価格】オープン価格

【納入価格】1セット 卸様経由でお見積もり下さい

※通常価格(7足+ディスプレイケース):63,000円

品番：9003 ワイドサイズ

商品名：ダブルマジックⅢ 7Eセット

【販売価格】オープン価格

【納入価格】1セット 卸様経由でお見積もり下さい

※通常価格(7足+ディスプレイケース):64,400円

品番：9003 ワイドサイズ

商品名：ダブルマジックⅢ 9Eセット

【販売価格】オープン価格

【納入価格】1セット 卸様経由でお見積もり下さい

※通常価格(7足+ディスプレイケース):65,800円



ディスプレイケース：

幅:32.2cm 奥行:12.3cm 高さ:81.2cm

ケース入りなので持ち運びが簡単！
その場でお客様のサイズが選定できます！
※S～5Lサイズの7サイズをご用意！

ご担当の販売卸様に
是非ご相談ください



大人気の「瞬感スポツと」もキット化

【プレゼント】受講感謝企画(合計4名様+a)

1 新人様応援キット

1 名様:瞬感スポッと(3E)試し履きセット

※試し履きセット:「刺繍柄」「接触冷感」も入ります

1 名様:ダブルマジックⅢ(3E)試し履きセット

※試し履きセット:合皮タイプ以外の柄(綾風・凛・ストレッチetc)も入ります



ご応募お待ちしております！


当選者はプレゼンターより後日
(6月中)にご連絡させていただきます

※当選後、効果などもお聞きしたいです！


2 簡易計測器 2名様



3 缶バッチ 申込頂いたお客様に お客様にお届けします(数制限無し※)

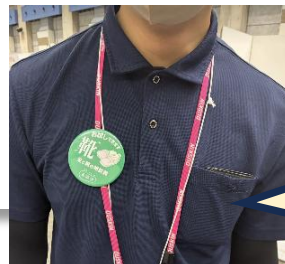

「“お客様から”話かけて頂くことが増えました。
靴の相談を頂くようになりました！」

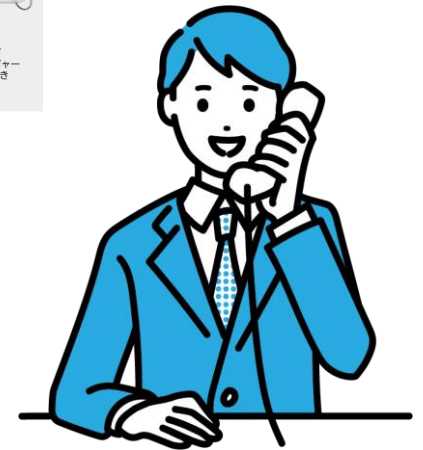

足元から人生を幸せに
TOKUTAKE

徳武産業の取り組みについてご紹介

- ・アンケートはがき
- ・弊社HP上にショップ様用POP

商品に同梱：アンケートハガキの代筆のお願い

約30,000枚
レスポンス率約2%！

現金受取人私印使

長尾郵便局
承認
1911

発行有効期間
2017年7月
31日まで

(受取人)
香川県さぬき市大田町
富田西3007
徳武産業株式会社
お客様窓口

担当 宛
879-63-5618
〒760-0100
香川県高松市南木場二丁目一番地
三井住友銀行 高松支店 本館内
当行にない場合は、
近隣のATMでお引き換えください。

ただいまありがとうございます。
※お座りかたにご注意してご利用をさせていただきます。
ここに並べ、ご協力をお願いします。

カラー サイズ L.L.

ましたか？
①病院売店
②ホームセンター・薬局
③その他（ ）
ですか？

3.祖父父母
4.知人)

ください。何かトラブルはありますか？
リウマチ
⑤腰痛
⑥補聴具)

?
3.病院
4.自宅)

は? (建築費許可)

3.デザイン
7.その他 ()
したか?

格 機能性 軽量感 耐き心地

○ ○ ○ ○

るへの要望などとお聞かせください。

あせる弱が気づかず、
施設と関係なく、
自分だけでいます。
足を固定した
から毎日歩道で、道をフレキシブル
で代わらせていただきます。
だ、先着のためです。

ハスおちした。施設と関係ない
病院で受けた。おちた人はいす。
ハスをおちした人の中から毎月抽選で、粗品をプレゼント
※当選者の氏名は抽選の結果をもってさせていただきます。
この度、おちた。おちたのためです。



あゆみ

誕生日プレゼント

感謝の気持ちをこめて
1年間誕生日プレゼント
を送付



年間 発送件数
約58,000件

必見 ショールームのお客様 POPご用意

【瞬感スポッと冷感はじめます】



データをダウンロード

POP ダウンロード



TOKUTAKE

データをダウンロード

Father's Day × コンフォートⅢ

Thanks Father's Day



を禁じます。

足元から人生を幸せに
TOKUTAKE

今後の予定(公式LINEから随時発信)

あゆみ

【全職種共通】 足のむくみ・腫れにお悩みの方への靴の相談	2/森/5
【全職種共通】 装具用靴の選定におけるポイントとコツ	3/森/5
【全職種共通】 外反母趾(足趾の変形)にお悩みの方への靴の相談	4/森/9
【全職種共通】 歩行訓練・リハビリ(デイ)するならどのような靴が良い?	4/森/1
【若手様・新人様】 足の計測方法・靴の選定ポイント(24年実施済)	6/3・6/4
【依頼が増えてます!】 「足と靴」勉強会を体験(どう話してるの? OJT風) NEW	7/8・7/9

＼より多くの方に参加してほしいから／
1日4回実施します!

- ① 8:30～9:00
- ② 9:30～10:00
- ③ 16:30～17:00
- ④ 17:30～18:00

お申込はコチラ



【あゆみ公式LINEご登録】



【悩んだらぜひ】
公式LINEに足
の画像を送って
下さい

過去アーカイブ動画



激アツすぎる!? 情熱をもって
みなさんにお伝えします!!
【パッション細川】と呼んでください!

プレゼンター

細川 順平

徳武産業株式会社
事業推進本部
プロジェクトリーダー



あるくたのしみ

あゆみ

入社10年目、他業種からの転職です。
靴や介護のことが分からない分野から
来たからこそ、分かりやすく、面白い研修を
心がけています。

ただいまより質疑応答のお時間とさせていただきます。

【①ご質問は挙手ボタンをクリック下さい】



【②詳細の中のQ&A欄でもご質問記入できます】



ご清聴ありがとうございました

徳武産業株式会社 事業推進本部
細川 順平

〒761-0901
香川県さぬき市大川町富田西3007
TEL : 0879-43-2167
FAX : 0879-43-5618
携帯 : 090-9770-2192

6月度 : アンケート

